

HEELIFT AFO • HEELIFT AFO ULTRA

1

Place the foot inside of boot with the heel resting above the opening.

Placez le pied dans la botte avec le talon placé au-dessus de l'ouverture de suspension du talon.



2

Thread straps through the D-rings and secure straps back together.

Passez les sangles par les bagues en D. Utilisez la fermeture crochet-boucle pour fixer les sangles.



3

Test the fit under heel opening. **Ensure no straps touch the skin.**

Testez l'ajustement sous l'ouverture de talon. **Assurez-vous que les sangles ne touchent pas la peau.**



Optional forefoot strap



La sangle d'avant-pied est facultative

EXAMINE LOWER EXTREMITY
EVERY 8 HOURS OR SOONER
AS REQUIRED

EXAMINER LE MEMBRE
INFÉRIEUR TOUS LES 8 HEURES
OU PLUS TÔT AU BESOIN

View Heelift Application video:
Voir la vidéo de l'application Heelift:

bit.ly/Heelift_Application

CUSTOMIZING FACULTATIVE



MALLEOLAR DECUBITUS

DÉCUBITUS MALLÉOLAIRE

ACHILLES TENDON

TENDON D'ACHILLE



SCD AND HEELIFT

SCD AVEC HEELIFT



If using Heelift Ultra Boots,
pull back the removable
elevation pad cover first.

Si vous utilisez des bottes
Ultra, retirez-les couverture
d'élévation en premier.



- Single-Patient Use
- Not Made with Natural Rubber Latex

- Utilisation à un seul patient
- Non fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel

View the Heelift Customizing video:
Voir la vidéo de personnalisation de Heelift:

bit.ly/Heelift_Customizing

HEELIFT ANTI-ROTATION WEDGE LE TALON ANTI-ROTATION HEELIFT

Use Heelift Anti-Rotation Wedge
(available separately) for prevention
of internal or external rotation.



Utilisez le talon
anti-rotation
Heelift pour la
prévention des
et rotation de la
jambe externe.



HEELIFT SIZING CHART HEELIFT TABLEAU DES TAILLES



CALF CIRCUMFERENCE

9 in (23 cm) from the heel

CIRCONFÉRENCE DU MOLLET

9 in (23 cm) des pieds

STANDARD

10 - 15 in (25 - 38 cm)

- Heelift AFOs available in STANDARD ONLY


- Heelift AFO disponibles en STANDARD SEULEMENT

CHOICE OF INTERIOR CHOIX D'INTÉRIEUR

UltraTec Liner
Doublure UltraTec



Smooth
Lisse

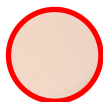

Convuluted
Convoluté



CARE INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE SOINS




To hand wash use a mild cleanser and warm water.

Pour le lavage à la main, utiliser un détergent doux et de l'eau tiède.




To machine wash and dry secure straps and place in laundry bag.

Pour le lavage et le séchage à la machine, fixer les sangles et placer les bottes dans un filet pour lessive ou dans une taie d'oreiller.

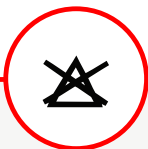

Do not bleach.

Ne pas utiliser de chlore.

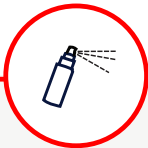

To sanitize use an antiseptic spray.

Pour la désinfection, utiliser une solution antiseptique en vaporisateur après le lavage.



To sterilize use standard protocols with a steam autoclave.

Pour stériliser, utiliser des protocoles standards avec un autoclave à vapeur.



+1.800.254.5438 | +1.847.328.9540
www.walgreenhealthsolutions.com



© 2018, Walgreen Health Solutions, LLC. All rights reserved.



Walgreen Health Solutions, LLC
1316 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201 USA



Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands